
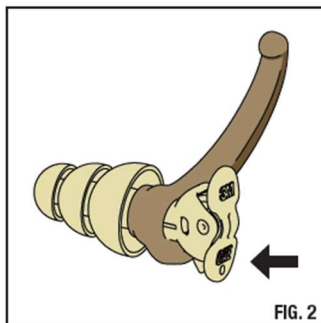


Zátkové chrániče sluchu Combat Arms 3M® PELTOR®

Špunty do uší s kolébkovým spínačem s malým otvorem a nápisem CAE na spodním jazýčku a s logem 3M na horním jazýčku.


Po stisknutí jazýčku s logem 3M zařízení funguje jako konvenční špunt do uší poskytující ochranu před stálým hlukem pocházejícím například z letadel, vozidel, generátorů nebo plavidel. Tento režim se nazývá **uzavřený režim**. Všimněte si, že zvuky jsou v tomto režimu tišší.

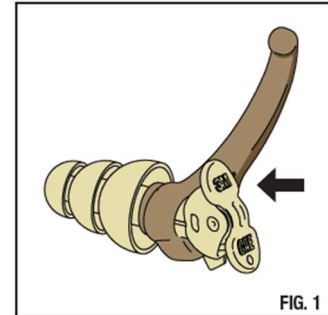



Po stisknutí jazýčku s malým otvorem a nápisem CAE zařízení umožňuje průchod zvuku, a přitom stále pomáhá chránit sluch před impulsním hlukem, jako je střelba ze zbraní. Tento režim se nazývá **otevřený režim**. Otevřený režim může uživateli pomoci zlepšit povědomí o situaci.

Kroky pro správné nasazení



1. Ujistěte se, že ucpávka označená „L“ je použita pro levé ucho a „R“ pro pravé ucho.
2. Zatímco druhou rukou vytahujete ucho nahoru a ven, vložte ucpávku do ušního kanálu. Přepínač by měl být ve vertikální poloze.

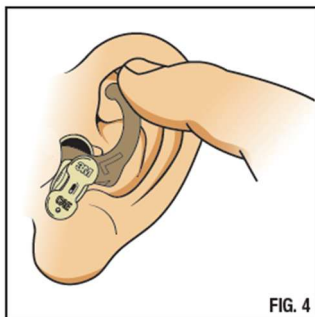

3. Pomocí ukazováčku zatlačte a ohněte pojistku do ucha, aby bylo zajištěno bezpečné uchycení.

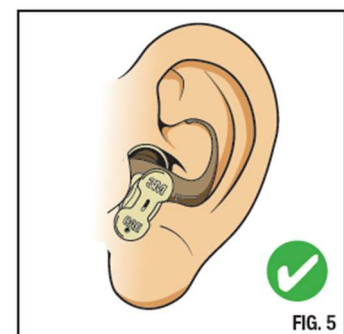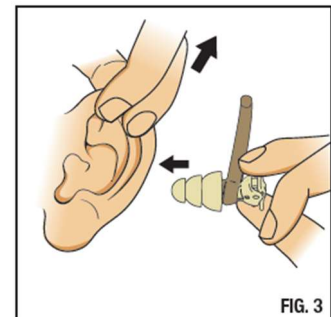


4. Pokud je správně vložena, pojistka by měla být plně upevněna a neměla by z ucha vyčnívat.

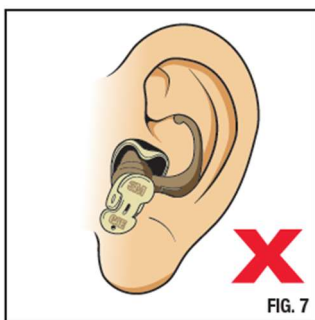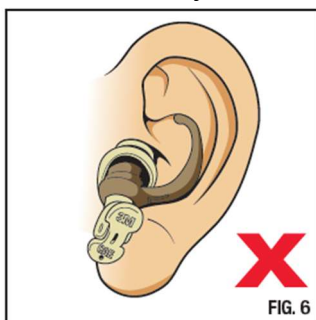

5. Pokud ucpávka nebo pojistka nepasuje, vyjměte chránič a znovu jej vložte.

Vyjmutí ucpávek

Pro větší

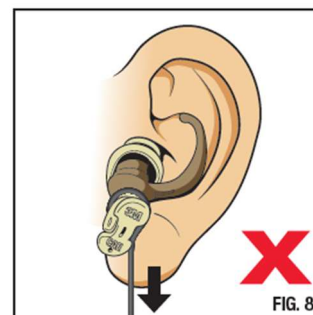

komfort otočte ucpávkou, aby se narušilo utěsnění, než špunt vytáhnete z ušního kanálu. Upozornění: Rychlé vyjmutí může poškodit ucho.

Kontrola správného nasazení

Vyberte nejmenší velikost, která poskytuje dobré utěsnění a bezpečné uchycení, ale zároveň dostatečně velkou, aby vnější příruba utěsnila ušní kanál na jeho vstupu. Rychlý a jednoduchý test správného nasazení je tzv. pumpovací test. Utěsnění lze otestovat jemným pumpováním ucpávky do a ven z ušního kanálu, zatímco přepínač je v režimu uzavřeného módu. Pokud je akustické / pneumatické utěsnění správné, měly by být patrné změny tlaku v uchu. Při otevřeném módu přepínače by tyto změny měly být méně výrazné nebo zcela nepřítomné. Pokud není patrný rozdíl mezi oběma režimy (otevřený / uzavřený), ucpávka pravděpodobně netěsní. Kromě toho by hlas uživatele měl znít hlasitěji a hlouběji, když mluví.

Čištění a dezinfekce

Tyto ucpávky jsou znovupoužitelné a měly by být čištěny jemným mýdlem a teplou vodou. Nechte přirozeně uschnout při pokojové teplotě. Neponořujte do vody, protože by to mohlo výrobek poškodit. Nepoužívejte alkohol ani jiné dezinfekční prostředky, mohou výrobek poškodit. K sušení produktu nepoužívejte teplo. Tvrdé plastové díly lze otřít. V případě jakýchkoli známek poškození výrobek ihned přestaňte používat.